

## Curas VEDELIKU ABSORBENT, SAP



Vedelike absorbent, SAP (super absorbent polümeer) pulber on mõeldud absorbeerimaks vedelikke ja ebameeldivaid lõhnasid ning kasutatakse reostuse vältimiseks ja vedelike jäätmete ohutuks käitlemiseks. Absorbent imab kiirelt vedelikku, moodustades kokkupuutel lõhna lukustava ilma kõrvalmõjudeta geeli. Koostis: superabsorbent kopolümeer (naatriumakrülaadi) pulber. Hoiustada toatemperatuuril kuivas kohas ning niiskuse ja kuuma eest kaitstuna.

### Valikus on:

- SAP pulber dosaatorpudelis 750 g
- SAP pulber 5 kg kasti
- SAP pulber ühekordses isesulava ümbrisega kilepakendis 6 g

Supilusikatäis (6 □ 7 g) absorbeerivat pulbrit või 6 g kilepakend asetada tühja anuma põhja või otse vedelikku. Pulber aktiveerub 15-30 sekundiga. Absorbeeriv pulber on võimeline siduma vedelikku 100 korda rohkem oma kaalust st. 6 g pulbrit on võimeline absorbeerima 600 g vedelikku. Kokkupuutel vedelikuga muudab absorbent vedeliku lõhnatuks geeliks.

### Kasutusvaldkonnad

- Uriinipudelid
- Siibrid
- Potitoolid
- Neerukausid
- Vedelikega kanistrid
- Vedelike lekkimine/voolamine

Seda saab kasutada nii ühekordsetes, kui ka korduvkasutatavates anumates. Geelistunud vedelikku tuleb käidelda vastavalt vedeliku iseloomule, kas bioloogiline jääde või olmejäät. Geelistunud vedelikku võib kallata kanalisatsiooni või asetada nt. siiber koos sisuga siibripes automaati. Mitte kallata kraanikaussi.